



Microdiffusione fisiologica di acqua di mare.

Il naso è la chiave per una buona respirazione.

Sia il naso che la mucosa nasale giocano un ruolo importante umidificando e riscaldando l'aria inspirata ed agendo, in definitiva come un "condizionatore d'aria". Quando è intasato, il naso non è più in grado di adempiere alle sue funzioni.

Inoltre, il muco può essere spesso una fonte di contaminazione in quanto vettore di germi patogeni, provocando potenzialmente disturbi all'apparato respiratorio.

Dal 1975, **STÉRIMAR™**, pioniere dell'igiene nasale, pone la sua conoscenza del mare e le sue risorse naturali al servizio della salute nasale.

STÉRIMAR™ è un dispositivo medico adatto per tutta la famiglia, dal bambino all'adulto. L'acqua di mare **STÉRIMAR™**, filtrata, 100% naturale e priva di conservanti, sfrutta le proprietà riconosciute dei sali minerali e dei microelementi in essa contenuti (zinco, rame, manganese, ferro, magnesio, selenio, ecc).

STÉRIMAR™, grazie alla sua particolare microdiffusione, consente un lavaggio delicato della mucosa nasale, e facilita l'assorbimento degli elementi evitando la diffusione del muco.

STÉRIMAR™ rispetta l'ambiente: il suo contenitore in alluminio può essere riciclato. Il suo imballaggio è fatto con carta riciclata ed il foglietto illustrativo è stampato su carta senza cloro ecocompatibile.

L'acqua di mare viene prelevata sulla costa Atlantica e dopo averne verificato la purezza fisiologica, è pronta per essere utilizzata.

ISTRUZIONI:

STÉRIMAR™ può essere usato in tutte le posizioni ed in massima sicurezza. L'ugello è adatto sia per le piccole narici del bambino, sia per quelle dell'adulto.

Confezionato asetticamente. Contenitore pressurizzato con gas inerte (azoto). La soluzione si trova in un contenitore interno e non viene a contatto con l'azoto.

AVVERTENZE

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Tenere al riparo dal calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di ignizione. Non fumare durante l'uso. Non perforare o bruciare, neanche dopo l'uso. Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori ai 50°C/122°F. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Distribuito e commercializzato
in Italia da:
LABORATORI BALDACCI S.p.A.
Via S. Michele degli Scalzi 73 -
56124 PISA (Italia)

 **SOFIBEL - Laboratoires Fumouze**
110-114 rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret Cedex - (France)



104352/1

www.sterimar.com

R 02-2017

Igiene e benessere nasale

PER USO QUOTIDIANO

Può essere utilizzato in seguito ad interventi chirurgici nasali.

FISIOLOGICA*

Acqua di mare

Sali da 8,7 a 10,2 g/l

- † Deterge ed elimina le impurità;
- † Idrata e ripristina la naturale umidità della mucosa nasale;
- † Previene le infezioni a orecchio, naso e gola rafforzando le difese della mucosa nasale;
- † Aiuta la respirazione nasale, favorendo il sonno e migliorandone la qualità.

Bambini ed adulti

Al primo utilizzo, spruzzare una volta a vuoto per attivare il sistema. Con la testa in posizione verticale, inserire l'ugello nella narice. Spruzzare una o due volte in ogni narice. Attendere che la soluzione in eccesso fuoriesca e soffiare il naso. Per una pulizia più in profondità delle cavità nasali: con la testa inclinata da un lato, inserire l'ugello nella parte superiore della narice. Spruzzare una volta più a lungo (da 2 a 3 secondi). Attendere che la soluzione in eccesso fuoriesca dall'altra narice e soffiare il naso.

Effettuare da 2 a 6 erogazioni al giorno. Circa 150 erogazioni

Volume netto: **50 ml**  **89**

Naso chiuso

DECONGESTIONE

Libera velocemente il naso in caso di raffreddore e sinusite detergendo le cavità nasali. Previene la contaminazione influenzale (se esposti ad agenti esogeni responsabili dell'influenza)

IPERTONICA**

Acqua di mare

Sali da 21,1 a 24,8 g/l

- † Libera velocemente la mucosa nasale;
- † Elimina il muco denso;
- † Contribuisce a combattere raffreddore, rinite, sinusite e a ridurre il rischio di infezioni secondarie grazie alla pulizia delle cavità nasali;
- † Previene l'infezione influenzale (se esposti ad agenti esogeni responsabili dell'influenza).

Bambini ed adulti

Al primo utilizzo, spruzzare una volta a vuoto per attivare il sistema. Con la testa in posizione verticale, inserire l'ugello nella narice. Spruzzare una o due volte in ogni narice. Attendere che la soluzione in eccesso fuoriesca e soffiare il naso. Per una pulizia più in profondità delle cavità nasali: con la testa inclinata da un lato, inserire l'ugello nella parte superiore della narice. Spruzzare una volta più a lungo (da 2 a 3 secondi). Attendere che la soluzione in eccesso fuoriesca dall'altra narice e soffiare il naso. Usare da 2 a 6 volte al giorno o più fino ad ottenere la decongestione nasale. Indicato per uso temporaneo in caso di naso chiuso.

Acqua di mare: 75 ml

Sale di Rame pentaidrato, Sale di Manganese monoidrato (Cu / Mn), Acqua depurata qb 100 ml. Circa 150 erogazioni.

Volume netto: **50 ml**  **89**

Allergia nasale

PREVENZIONE

In caso di naso sensibile all'allergia. Previene starnuti, goccia al naso e prurito. L'uso quotidiano è consigliato all'inizio della stagione allergica e per la pulizia prima della somministrazione di trattamenti legati ai disturbi di orecchio, naso e gola.

FISIOLOGICA*

Acqua di mare

Sali da 8,7 a 10,2 g/l

- † Pulisce ed elimina gli allergeni a contatto con la mucosa nasale (pollini, particelle inquinanti, polvere, acari della polvere, peli di animali, ecc);
- † Idrata e ripristina l'umidità naturale della mucosa nasale;
- † Previene lo sviluppo di allergie.

Neonati, Bambini, Adulti

Al primo utilizzo, spruzzare una volta a vuoto per attivare il sistema. Con la testa in posizione verticale, inserire l'ugello nella narice. Spruzzare una o due volte in ogni narice. Attendere che la soluzione in eccesso fuoriesca e soffiare il naso.

Per una pulizia più in profondità delle cavità nasali: con la testa inclinata da un lato, inserire l'ugello nella parte superiore della narice. Spruzzare una volta più a lungo (da 2 a 3 secondi). Attendere che la soluzione in eccesso fuoriesca dall'altra narice e soffiare il naso.

Acqua di mare: 31,82 ml

Sale di Manganese monoidrato (Mn), Acqua depurata qb 100 ml. Circa 300 erogazioni.

Volume netto: **100 ml**  **89**

Naso sensibile al raffreddore

PREVENZIONE

In caso di prevenzione a complicazioni ad orecchio, naso e gola (raffreddore, rinite e sinusite). L'uso quotidiano è consigliato all'inizio della stagione invernale e per la pulizia prima della somministrazione di trattamenti legati ai disturbi di orecchio, naso e gola.

FISIOLOGICA*

Acqua di mare

Sali da 8,7 a 10,2 g/l

- † Deterge ed elimina le impurità, in particolare gli agenti responsabili del raffreddore;
- † Idrata e ripristina la naturale umidità della mucosa nasale;
- † Previene lo sviluppo di raffreddore e riniti e riduce il rischio di complicazioni ad orecchio, naso e gola (sinusiti, bronchiti ed otiti)

Neonati, Bambini, Adulti

Al primo utilizzo, spruzzare una volta a vuoto per attivare il sistema. Con la testa in posizione verticale, inserire l'ugello nella narice. Spruzzare una o due volte in ogni narice. Attendere che la soluzione in eccesso fuoriesca e soffiare il naso.

Per una pulizia più in profondità delle cavità nasali: con la testa inclinata da un lato, inserire l'ugello nella parte superiore della narice. Spruzzare una volta più a lungo (da 2 a 3 secondi). Attendere che la soluzione in eccesso fuoriesca dall'altra narice e soffiare il naso. Effettuare da 2 a 6 volte al giorno.

Acqua di mare: 31,82 ml

Sale di Rame pentaidrato (Cu), Acqua depurata qb 100 ml. Circa 300 erogazioni.

Volume netto **100 ml**  **89**

* Soluzione che contiene una concentrazione di sali simile a quella presente nelle cellule del corpo umano.

** Soluzione che contiene una concentrazione di sali superiore a quella presente nelle cellule del corpo umano.

